

MD-MUSCLE

Producent: GUNA S.p.A., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Włochy

Skład: Kolagen pochodzenia wieprzowego.

Substancje pomocnicze: Hypericum, NaCl, woda do wstrzykiwań

Dla tego wyrobu medycznego dostępne są następujące opakowania:

- pudełko: 5 fiolek (pojedyncza fiołka 2 ml – objętość ekstrakcyjna)
- pudełko: 10 fiolek (pojedyncza fiołka 2 ml – objętość ekstrakcyjna)
- pudełko: 50 fiolek (pojedyncza fiołka 2 ml – objętość ekstrakcyjna)

Zawiera sterylne fiołki.



Środki ostrożności dotyczące przechowywania
Chronić przed światłem słonecznym i zamrażaniem.



Warunki przechowywania i postępowania:

Przeznaczenie

MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym zaprojektowanym w celu wspomaganie ruchu poprzez ograniczanie fizjologicznej degeneracji stawów i tkanek, jak również przeciwdziałanie wszelkim uszkodzeniom spowodowanym przez:

- starzenie,
- nieprawidłową postawę,
- współistniejące choroby przewlekłe,
- urazy i obrażenia,
- zanieczyszczenia.

MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym zaprojektowanym w celu wspomaganie ruchu mięśni i stawów. Jego główne funkcje terapeutyczne obejmują:

1. efekt bariery,
2. działanie smarujące,
3. wsparcie mechaniczne podczas podawania innych terapii farmakologicznych.

MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania przez wykwalifikowany personel w prywatnych lub publicznych placówkach ochrony zdrowia w celu:

- wspomaganie rozciągania i funkcji mięśni,
- wspomaganie tkanki mięśniowej w zaburzeniach nieprawidłowej postawy,
- poprawy ruchomości stawów,

- łagodzenia bólu miejscowego lub bólu spowodowanego ruchem i nieprawidłową postawą.

Sposób użycia

Protokół terapeutyczny

1–2 zabiegi tygodniowo przez 10 kolejnych tygodni.

Technika iniekcji domięśniowej (Miejsce podania musi być aseptyczne; wprowadzić igłę do leczonego mięśnia na głębokość 2–4 mm)

W tym celu zaleca się użycie następujących materiałów i akcesoriów:

- Materiały do aseptycznego przygotowania skóry: rękawiczki jednorazowe, roztwór jodu, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, spray chlorku etylu do skóry.
- Igły: sterylne 27 G.
- Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia.

Technika iniekcji domięśniowej

W tym celu zaleca się użycie następujących materiałów i akcesoriów:

- Materiały do aseptycznego przygotowania skóry: rękawiczki jednorazowe, roztwór jodu, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, spray chlorku etylu do skóry.

Zaleca się zastosowanie miejscowego środka znieczulającego na skórę.

- Igły: sterylne 22 G.
- Strzykawki: rozmiar 2 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia.

Przeciwwskazania / działania niepożądane

Nie ma historii nadwrażliwości na MD-MUSCLE. Produkt zawiera kolagen pochodzenia zwierzęcego ze źródła wieprzowego. Jednak pacjenci ze znaną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik lub substancję pomocniczą powinni zostać przebadani przed użyciem poprzez wykonanie próbnego wstrzyknięcia w jedno ramię oraz pozostać pod uważną obserwacją przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból mięśni wymaga diagnostyki różnicowej w kierunku: bólu nerwowego metamerycznego, zapalenia ścięgien, głębokiego nagromadzenia krwi.

Niewielkie zaczerwienienie w miejscu iniekcji może być spowodowane mechanicznym działaniem igły lub reakcją skórną.

Podanie może powodować objawy pieczenia/bólu w miejscu iniekcji, które zwykle ustępują samoistnie w ciągu 5–10 minut po leczeniu.

Przed i po zastosowaniu wymagana jest dezynfekcja skóry: bakterie ropotwórcze mogą powodować ropnie w miejscu iniekcji.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu prawidłowo przechowywanego w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Produkt zużyć natychmiast po otwarciu.

Instrukcje dotyczące stosowania

MD-MUSCLE może być stosowany jako pojedyncze leczenie lub mieszany z innymi wyrobami medycznymi tej samej linii, w celu stworzenia spersonalizowanego leczenia zgodnie z przebiegiem klinicznym. Gdy konieczne jest leczenie wspomagające dla macierzy tkanki łącznej lub gdy konieczne jest działanie przeciwstarzeniowe, MD-MUSCLE może być łączyony z MD-MATRIX oraz MD-TISSUE.

Może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne podczas leczenia następujących chorób:

- leczenie bólu: ostrego, podostrego i przewlekłego,
- leczenie obszaru bólu somatycznego rzutowanego (w połączeniu z MD-NEURAL),
- leczenie punktów spustowych (w połączeniu z MD-NEURAL),
- zespół fibromialgii (w połączeniu z MD-NEURAL),
- zapalenie skórno-mięśniowe.

Sposób podawania może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb.

Instrukcje w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek

Nie używać, jeśli zabezpieczenie jest uszkodzone lub jeśli fiolka nie jest prawidłowo zamknięta. Po otwarciu zawartość fiołki musi zostać natychmiast wstrzyknięta. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.