

WYRÓB MEDYCZNY - OPATENTOWANA FORMUŁA

TCA 33% MODYFIKOWANY H₂O₂

SKŁAD: nadtlenek wodoru, kwas trichlorooctowy (TCA) w stężeniu 33%, kwas kojowy, stabilizatory.

WSKAZANIA: Zabieg na zmniejszanie elastozy skóry twarzy i dekoltu. Prewencja atrofii skóry. Zabieg na łagodzenie objawów melanoderмии i hiperpigmentacji pozapalnej.

SPOSÓB UŻYCIA I STOSOWANIE:

- PRZEBIĆ ZATYCZKĘ BUTELKI IGŁĄ (18G)
- WŁOŻYĆ STRZYKAWKĘ DO IGŁY I ZASSAĆ ŻĄDANĄ ILOŚĆ PRODUKTU
- WYCIĄGNAĆ IGŁĘ ZE STRZYKAWKI I NAŁOŻYĆ (STRZYKAWKA BEZ IGŁY) MAŁĄ ILOŚĆ PRODUKTU NA DOBRZE OCZYSZCZONĄ SKÓRĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM ZABIEGIEM
- USUNĄĆ POZOSTAŁOŚĆ PRODUKTU WACIKIEM NASĄCZONYM WODĄ
- PRZYWRÓCIĆ PŁASZCZ HYDROLIPIDOWY NASKÓRKA, STOSUJĄC ODPOWIEDNI PRODUKT.

OSTRZEŻENIA: WYRÓB MEDYCZNY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. W przypadku kontaktu z oczami lub błoną śluzową, przepłukać dużą ilością roztworu soli fizjologicznej.

Produkt może okazać się korozyjny, jeśli nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami użycia